

Kiirjuhend

Kiire demarrage'i juhend



Kursusleitung

Guida rapida

Guía de inicio rápido

Stručná úvodní příručka

Sparčiosios paleisties vadovas

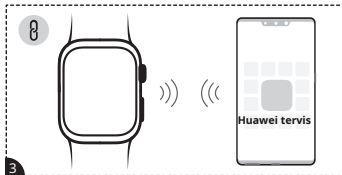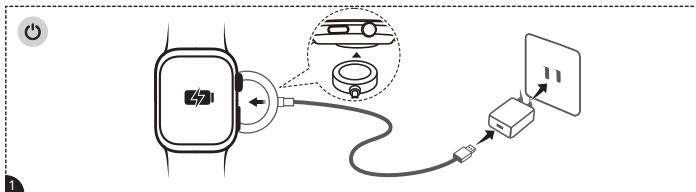

0. Ohutu kasutamine

See seade on kodutarbeks kasutatav toode randmelt vererõhu mõõtmiseks. See sobib kasutamiseks üle 18-aastastele täiskasvanutele.

Kui seda seadet kandval inimesel kasutatakse defibrillaatorit, võib see mõjutada seadme vererõhu mõõtmise funktsiooni.

Kui teil on selle seadme kohta küsimusi, helistage klienditeeninduse infotelefonile. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline/>.



Hoiatused

- Seda seadet ei ole kinnitatud kasutamiseks vastsündinutel ega rasedatel.
- Kui teie randmeümbermõõt on väiksem kui 13,0 cm või suurem kui 21,0 cm, võib see mõjutada vererõhu mõõtmise täpsust.
- ÄRGE KUNAGI diagnoosige, ravige ennast ise ega kohandage oma ravimeid selle seadme näitude põhjal. Konsulteerige ALATI oma arstiga ja võtke ravimeid vastavalt ettekirjutusele. AINULT arst on kvalifitseeritud kõrge vererõhu diagnoosimiseks ja raviks.
- Ärge kasutage seda seadet, kui olete allergiline nailoni, fluorkummi või termoplastsete polüuretaanide suhtes.
- Ärge kandke seda seadet intravenoossete infusioonide või vereülekannete ajal ega kateetri randmesse sisestamise ajal, kuna see võib piirata verevoolu ja põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage seda seadet, kui teie randme on vigastatud või kui te saate ravi, kuna see võib põhjustada edasisi vigastusi.
- Kui teil on tehtud mastektomia või lümfisõlmede disseksioon, pidage enne selle seadme kasutamist nõu oma arstiga.

- Enne selle seadme kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui teile tehakse intravaskulaarset sekkumist või ravi või kui teil on arteriovenoosne (AV) šunt, kuna see võib ajutiselt verevoolu piirata ja põhjustada vigastusi.
- Veenduge, et see seade ei takista verevoolu, jälgides vererõhu mõõtmise ajal oma kätt.
- Ärge mõõtke vererõhku liiga sageli, kuna verevoolu piiratuse korral võivad tekkida verevalumid.
- Pikaajaline kandmine võib põhjustada hõõrdumist või survet, mis võib teie nahka ärritada. Palun eemaldage see seade aeg-ajalt, et randmel puhata.
- See seade võib ajutiselt häirida teiste samal käel samaaegselt kasutatavate elektriliste meditsiiniliste jälgimisseadmete tööd.
- Ärge asetage seadet kaasaskantavate või mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete lähedusse, kuna see võib mõjutada seadme funktsioone ja täpsust.
- Ärge kasutage seadet kõrgsageduslike kirurgiliste seadmete, magnetresonantstomograafia seadmete ega arvutitomograafide läheduses, kuna see võib mõjutada seadme funktsioone ja täpsust.
- Ärge kasutage seadet hapnikurikkas keskkonnas ega tuleohtlike gaaside läheduses.
- Hoidke laadimisalust ja toitejuhet vastsündinute, imikute ja laste käeulatusest eemal, et minimeerida kägistamisohtu.
- Hoidke seadet vastsündinute, imikute ja laste käeulatusest eemal, kuna see sisaldab palju väikeseid osi, mis võivad lämbumisohtu kujutada.
- Ärge võtke seadet lahti ega muutke selle kallal muudatusi, kuna see võib seda kahjustada ja/või põhjustada vigastusi.

- Sellel seadmel on eemaldamatu aku. Ärge proovige akut selle kasutusea jooksul vahetada ega parandada, kuna see võib seadet kahjustada ja/või põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage muid lisatarvikuid, muundureid ega kaableid peale nende, mida selle seadme tootja on määranud või tarninud, kuna see võib suurendada elektromagnetilist kiirgust või vähendada elektromagnetilist immuunsust.
- Ärge kasutage seadet teise seadme kõrval, all või peal, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik, ja isegi siis ainult mõlema seadme nõuetekohase järelevalve all.
- See seade on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada tervishoiuasutustes, kus see asub kõrgsageduslike kirurgiliste seadmete läheduses, väljaspool raadiosagedusliku varjestusega ruume magnetresonantstomograafia (MRI) aparaatide kõrval ega kohtades, kus esineb kõrgsageduslikke ja tugevaid elektromagnetilisi häireid.



Ettevaatusabinõud

- Hoidke seadet puhtana. Lõpetage seadme kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole, kui see põhjustab nahaärritust või muid kõrvaltoimeid.
- Teil võib selle seadme suhtes tekkida allergiline reaktsioon. Lõpetage seadme kasutamine kohe ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib seadme kasutamisel mingeid kõrvaltoimeid.
- Kui rihm pärast vererõhu mõõtmist ei tühjene, palun eemaldage see.
- Ärge kasutage seda seadet koos teiste meditsiiniliste elektriseadmetega, kuna see võib mõjutada selle seadme funktsioone ja täpsust.
- Enne selle seadme kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui teil on arütmia (näiteks kodade või vatsakeste enneaegne löök või kodade virvendus), arterioskleroos, malperfusioon, diabeet, pre-

eklampsia või neeruhaigus. Kõik need seisundid võivad mõjutada vererõhu mõõtmise täpsust.

- Liikumine või värisemine vererõhu mõõtmise ajal võib mõjutada mõõtmise täpsust.
- Seda seadet on hoolikalt testitud. See saavutab vererõhu mõõtmiseks vajaliku täpsuse ja on heaks kiidetud kasutamiseks oma kehtivusaja jooksul. Selle toimivus võib pärast kehtivusaja lõppu halveneda.
- Selle seadme kasutajad peaksid olema ettenähtud operaatorid, kas patsiendid või patsiente abistavad operaatorid, ning funktsioone tuleks kasutada vastavalt käesolevale juhendile. Seda seadet saavad külalisrežiimis kasutada mitu kasutajat eri aegadel.
- Vaikimisi töötab ja jälgib see seade andmeid taustal ning laadib automaatselt üles seotud logid.
- Ärge kasutage seadet suure koormusega keskkondades, näiteks meditsiinikliinikutes või arstide kabinetides.

1. Põhiteave

1.1 Struktuur ja koostis

See seade koosneb korpusest, rihmast (mille sees on turvapadi) ja juhtmevabast laadimisalusest.

1.2 Eesmärk

See seade on digitaalne enesemonitor, mis on ette nähtud vererõhu, 24-tunnise ambulatoorse vererõhu ja pulsisageduse mõõtmiseks täiskasvanutel, kelle randmeümbermõõt on vahemikus 13,0 cm kuni 21,0 cm. Mõõtmistulemusi ei tohiks diagnoosi alusena kasutada.

1.3 Vastunäidustused

Vastunäidustusi ei ole leitud.

1.4 Kliiniline kasu

See seade aitab kasutajatel jälgida vererõhku ja teha 24-tunnist ambulatoorset vererõhu enesemonitooringut ning aitab hüpertensiooniga diagnoositud kasutajatel tuvastada vahelduva hüpertensiooni episoodi igapäevaste tegevuste ajal.

1.5 Andmeedastus

See seade edastab seadme uuendamiseks ja andmeedastuseks 2,4 GHz raadiosagedussignaale. Ärge kasutage seda kohtades, kus raadiosageduse kasutamine on piiratud. Pärast Bluetoothi lahtiühendamist jätkavad vererõhu mõõtmised normaalselt, kuid tarkvaraversiooni uuendamine ebaõnnestub ja andmeid ei saa sünkroonida.

1.6 Tulemusnäitajad


Nimi	Randme ambulatoorne vererõhumõõtaja
Mudelid	LCA-B10/LCA-B11

Tarkvarakomponendi väljalaske versioon	V1
Bluetooth	Bluetooth 4.0 või uuem
Traadita side	Sagedusvahemik: 2,4 GHz (2402–2480 MHz) Modulatsioon: GFSK, pi/4-DQPSK, pi/8-DPSK Efektiivne kiirgusvõimsus: < 20 dBm
Elektrilöögi vastase kaitse tüüp	Sisemine toiteallikas
Rakendusdetailid	Turvapadi ja alumine kate (klassifikatsioonitüüp: tüüp BF)
Kaitsetase kahjulike vedelike või osakeste sissetungimise eest	IP68 (Seade pakub IEC 60529 standardi IP68 reitinguga määratud kaitsetaset. See on tolmukindel ja seda võib ohutult 30 minutiks vette kasta 1,5 meetri sügavusel.)
Ohutustase kokkupuutel õhu, hapniku või dilämmastikoksiidiga segatud tuleohtlike anesteetikumgaasidega	Mitte-AP/APG tüüpi
Töörežiim	Pidev töötamine
Toiteallikas	Laetav liitiumioonpolümeeraku (nimimaht: 524 mAh; nimipinge: 3,89 V)
Aku tööiga	Tüüpiline kasutus: 5 päeva Aku tüüpiline eluiga: Täislaetud uus aku kestab toatemperatuuril (25 °C) kasutamisel umbes 500 tsüklit. Aku tase kuvatakse seadme ekraanil.
Kehtivusaeg	Seadme korpus: 3 aastat; rihm (koos turvapadjaga): 1 aasta Märkus: Toote kehtivusaega arvutatakse üldiselt ajana esimesest kasutuskorrast kuni ajani, mil toode lakkab oma ettenähtud otstarbel toimimast.

Mõõtmismeetod	Ostsillomeetriline meetod
Rõhu mõõtmise vahemik	0 mmHg ~ 300 mmHg (0 kPa ~ 40 kPa)
Pulsisageduse mõõtmise vahemik	40 korda/min ~ 180 korda/min
Täpsus	Rõhk: ± 3 mmHg ($\pm 0,4$ kPa) Pulsisagedus: $\pm 5\%$
Vererõhu mõõtmise vahemik	Diastoolne vererõhk: 40 mmHg ~ 130 mmHg (5,3 kPa ~ 17,3 kPa) Süstoolne vererõhk: 60 mmHg ~ 230 mmHg (8,0 kPa ~ 30,7 kPa)
Inflatsioonimeetod	Automaatne rõhupump
Deflatsioonimeetod	Automaatne kiire tühjendamine
Toimivuse efektiivsus	Ühekordse vererõhu mõõtmise aeg < 180 sekundit
Randme ümbermõõdu vahemik	M-suuruses turvapadi: 13,0 cm ~ 16,0 cm L- suuruses turvapadi: 16,1 cm ~ 21,0 cm Palun vali oma randme ümbermõõdule sobiv turvapadi. Kui randme ümbermõõt ületab 21,0 cm, võib see mõjutada vererõhu mõõtmise täpsust.
Rakendatud osade maksimaalne temperatuur	40°C

See seade vastab standardile IEC 80601-2-30 ja on kliiniliselt testitud vastavalt standarditele ISO 81060-2:2018 ja AMD1:2020. Kliiniline uuring hõlmas puhkeseisundi vererõhu jälgimise testi ja ambulatoorset vererõhu jälgimise testi. Puhkeseisundi vererõhu jälgimise test viidi läbi enam kui 85 katsealusel. Nende süstoolse ja diastoolse vererõhu keskmine hälve ei ületanud ± 5 mmHg ning süstoolse ja diastoolse vererõhu standardhälve ei ületanud 8 mmHg. Ambulatoorse vererõhu jälgimise test viidi läbi enam kui 35 katsealusel. Nende süstoolse ja diastoolse vererõhu keskmine hälve ei ületanud ± 5 mmHg ning süstoolse ja diastoolse vererõhu standardhälve ei ületanud ka antud juhul 8 mmHg.

1.7 Struktuuriskeem ja pakkimisnimekiri

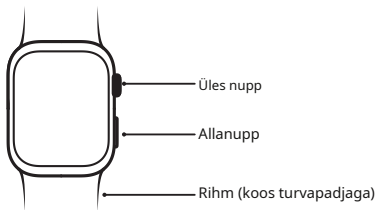

Märkused:


- Õhuava asub kohas, kus seadme korpus ja rihm kohtuvad.
- Vererõhu mõõtmise alustamiseks vajutage allanoolt ja mõõtmise peatamiseks ülesnoolt.

Pakkimisnimekiri:

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| • Seade (L-suuruses rihma ja L-suuruses turvapadjaga) x 1 | • M-suuruses rihm (M-suuruses turvapadjaga) x 1 | • Randmeümbermõõdu joonlaud x 1 |
| • Kiirjuhend x 1 | • Kandmisjuhend x 1 | • Garantiikaart x 1 |
| • Laadimisalus (0,7 m varjestatud kaabliga) x 1 | | |

1.8 Sisselülitamine või automaatne taaskäivitamine pärast laadimist

Joonda laadija seadme tagaküljel oleva laadimisalaga, seejärel ühenda kaabel toiteallikaga ja oota, kuni aku tase ekraanile ilmub.

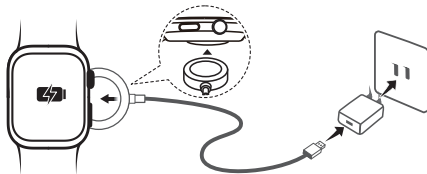


1.9 Seadme seadistamine

1. Skanneeri oma telefoniga QR-koodi või otsi AppGalleryst või veebilehelt consumer.huawei.com märksõna „Huawei Health”, et Huawei Healthi rakendus alla laadida.
2. Avage Huawei Healthi rakendus, minge seadmete ekraanile, valige seadmed, mida soovite lisada, ja järgige sidumise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.




1.10 Randme ümbermõõdu mõõtmine ja seadme kandmine

1. Mõõda randme ümbermõõt umbes kahe sõrme laiuselt peopesa alumisest osast.
2. Tõmmake mõõtevahendi saba läbi peas oleva pandla, kuni see puudutab kätt, et vältida liiga tugevat pingutamist, ja salvestage noolega näidatud number.

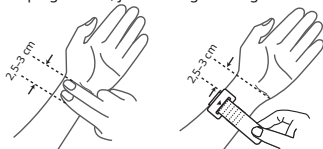

3. Valige rihma suurus joonlaua skaala järgi. (M: 5-11; L: 12-20).

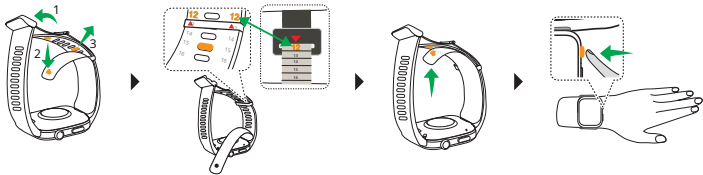

2. Vererõhu mõõtmine

2.1 Põhimõtted

See seade mõõdab vererõhku ostsillomeetrilisel meetodil. Kui randmerihma (turvapadja) rõhk suureneb, jälgib ja analüüsib seadmerihma rõhuandur rõhu kõikumisi ning arvutab automaatselt teie süstoolse ja diastoolse vererõhu ning pulsisageduse.

2.2 Teie ümbrus

Võrk	Bluetooth 4.0 või uuem
Temperatuur	5–40 °C
Niiskus	10% kuni 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
Atmosfäärirõhk	80 kPa kuni 105 kPa
Uhilduv telefonisüsteem	Android 8.0/iOS 13.0 või uuem



Märkused

- Hoidke seadet eemal elektromagnetilistest häiretest, vibratsioonist ja mürast.
- See seade ei tööta optimaalselt, kui teie ümbrus ei vasta nõuetele.
- Enne vererõhu mõõtmist veenduge, et teie ümbrus vastab seadme optimaalseks toimimiseks vajalikele nõuetele. Äärmuslikud temperatuurid, niiskus või kõrgus merepinnast võivad seadme täpsust mõjutada. Kui teie ümbruse temperatuur langeb väljapoole seadme optimaalset vahemikku, asetage seade enne kasutamist umbes üheks tunniks ohutusse kohta, kus temperatuur jääb ettenähtud töötemperatuuri vahemikku.
- Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
- See seade ei ole mõeldud avalikes kohtades iseseisvaks kasutamiseks.
- Seda seadet saab ühendada ainult Bluetoothi kaudu ning see suudab edastada värskenduspakette ja vererõhuandmeid. Enne seadme ühendamist teise seadmega (kui see on eelnevalt mõne teise seadmega ühendatud) peate selle tehaseadetele taastama.
- Ärge kasutage seda seadet liikuvus sõidukis, näiteks autos, rongis ega lennukis.

2.3 Mõõtmisnõuded

Vererõhu mõõtmise tulemusi võivad mõjutada mõõtmisasend, kehahoiak, liigutused ja

füsioloogilised tingimused. Mõõtmiste täpsuse tagamiseks veenduge järgmises:

- Vältige vähemalt 30 minutit enne vererõhu mõõtmist söömist, alkoholi tarvitamist, suitsetamist ja treeningut.
- Enne vererõhu mõõtmist puhake 5 minutit ja hoidke oma keha kogu mõõtmise vältel lõdvestunud. mõõtmine. Vältige vererõhu mõõtmist emotsionaalse või stressirohke olukorra ajal.
- Tehke vererõhumõõtmisi vaikes keskkonnas. Ärge rääkige ega liigutage vererõhu mõõtmise ajal sõrmi, käsi ega keha.
- Kui mõõdate vererõhku järjest rohkem kui ühe korra, laske randmel iga mõõtmise vahel vähemalt 1–2 minutit puhata, et arteritel oleks aega oma tavapärasesse olekusse naasta.
- Kui teie vererõhu mõõtmise tulemus jääb väljapoole normi, puhake 5 minutit ja mõõtke vererõhku uuesti või pidage nõu oma arstiga.

2.4 Teie rüht

Mõõtmise ajal on soovitatav istuda mugavalt, jalad põrandal, jalad ristimata, selg ja käed toetatud ning seade südame kõrgusel. Püüdke säilitada soovitatavat asendit vererõhu mõõtmise algusest kuni seadme mõõtmistulemuse kuvamiseni. Igasugune kõrvalekalle soovitatavast asendist võib mõõtmistulemust mõjutada. Lisateavet standardse mõõtmisasendi kohta leiate kandmisjuhendist.

2.5 Enne vererõhu mõõtmist

1. Randmeümbermõõdu määramine

Kui kasutate seadmes vererõhu või ambulatoorse vererõhu jälgimise (ABPM) rakendust esimest korda, palutakse teil määrata randmeümbermõõt. Kasutage abiks kaasasolevat joonlauda. Kontrollige, kas seadmele paigaldatud turvapadi on teie randmeümbermõõdu jaoks õige suurusega.

2. Mõõtühiku muutmine

Vaikimisi ühik on mmHg. Ühiku muutmiseks libistage vererõhu või ambulatoorse vererõhu jälgimise (ABPM) rakenduses ekraanil üles, et avada seaded ja seejärel muuta ühikut.

2.6 Ühekordse vererõhu mõõtmise sooritamine

1. Avage rakenduste loend, valige vererõhurakendus ja alustage mõõtmist. Seejärel hakkab seade automaatselt pumbata ja kuvab vererõhuandmeid reaajas ekraanil. Vererõhu mõõtmise koheseks alustamiseks võite vajutada ka allanoolenuppu.
2. Kui mõõtmine on lõppenud, tühjeneb seade automaatselt ja kuvab mõõtmistulemuse.

2.7 Ambulatoorne vererõhu jälgimine (ABPM)


1. Avage rakenduste loend, valige ambulatoorse vererõhu jälgimise (ABPM) rakendus ja määrake ambulatoorse vererõhu jälgimise plaan.



2. Kui olete ambulatoorse vererõhu jälgimise plaani määranud, teeb seade mõõtmisi vastavalt plaanile.



3. Kui mõõtmine on lõppenud, tühjeneb seade automaatselt ja kuvab mõõtmistulemuse.

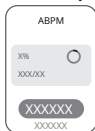

Märkus: Mõõtmisnäitajate hulka kuuluvad 24-tunnine keskmine väärtus, päevane keskmine väärtus, öine keskmine väärtus, maksimaalne väärtus, minimaalne väärtus, mediaan, standardhälve, mõõtmiste arv, vererõhu koormus, variatsioonikordaja, öine vererõhu langus ja hommikune vererõhu hüpe.

2.8 Vererõhu mõõtmise peatamine

- Vererõhu mõõtmise ajal mõõtmisest väljumiseks vajutage ülesnuppu või puudutage ekraanil tühistamisnuppu.
- Süsteem peatab mõõtmise automaatselt, kui see on lõppenud.

Märkused:

- Kui seade pärast vererõhu mõõtmist automaatselt ei tühjene, siis palun avage rihm.
- Seadme taaskäivitamiseks või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all ülesnuppu, kuni seadme ekraanil kuvatakse taaskäivitamise ja väljalülitamise valikud, ning valige vastavalt vajadusele suvand.
- Seade kuvab viimase 100 üsiku vererõhu mõõtmise ja viimase 300 ambulatoorse vererõhu mõõtmise tulemusi.
- Kui seade taastatakse tehaseseadetele, kustutatakse kõik teie andmed. Ainus viis andmete kustutamiseks on seadme tehaseseadete taastamine.
- Selles juhendis viitab kõrge rõhk süstoolsele vererõhule ja madal rõhk diastoolsele vererõhule.

2.9 Mõõtmisvead ja lahendused

Vea tüüp	Lahendus
Mõõtmise ajalõpp	Kui tõrge püsib pärast mitut katset, võtke ühendust volitatud Huawei teeninduskeskusega.
Inflatsioon väljaspool nimivahemik	Kui tõrge püsib pärast mitut katset, võtke ühendust volitatud Huawei teeninduskeskusega.
Inflatsiooni erand	Kontrollige, kas paigaldatud turvapadi on valesti ühendatud ja kas see on kahjustatud.
Sobimatu turvapadi	Järgige juhiseid randmeümbermõõdu mõõtmiseks, rihma (koos turvapadjaga) paigaldamiseks ja randmeümbermõõdu õigeks määramiseks.
Aeglane deflatsioon	Eemaldage seade kohe ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid või võtke ühendust volitatud Huawei teeninduskeskusega.

2.10 GUI lühendid

Lühend	Täisvorm
SÜSTEEM	süstoolne vererõhk
DIA	diastoolne vererõhk
cm	sentimeeter
sisse	tolli

2.11 Staatilise rõhu testi režiim

See hõlmab spetsiaalset personali, kes testib seadme staatilist jõudlust range protsessi abil pärast seadme staatilise rõhu testimise režiimi sisenemist.

3. Hooldus



Ettevaatusabinõud

- Kasutaja saab vahetada ainult rihma (sh turvapatja). Rihma vahetamise kohta leiate lisateavet kandmisjuhendist. Pange tähele, et originaalkomponendi asendamine mitte-HUAWEI komponendiga võib põhjustada mõõtmisvigu.
- Vererõhu mõõtmise ajal ei tohiks seadet hooldada. Vererõhuga seotud tarkvara on seadmesse eelinstallitud. Seade toetab juhtmevaba värskendusi (kui see on telefoniga ühendatud). Vererõhuga seotud tarkvara värskendatakse iga kord, kui seadet värskendatakse.
- See seade on varustatud eemaldamatu akuga. Ärge proovige seda vahetada ega eemaldada, kuna see võib seadet kahjustada ja/või vigastusi põhjustada.
- Seadme rõhumõõtesüsteem on sõltumatult kontrollitud ja seda pole vaja ise kontrollida. Kui vajate abi, võtke ühendust volitatud Huawei teeninduskeskusega.
- Vajadusel saab Huawei anda Huawei määratud hoolduspersonalile seadme parandatavate osadega seotud voluringiskeemi, komponentide loendi, illustratsioonid, kalibreerimisandmed ja muu teabe. Kui teil on remondi või varuosade kohta küsimusi, võtke ühendust volitatud Huawei teeninduskeskusesse.

3.1 Seadme hoiustamine

- Hoidke seadet puhtas ja ohutus kohas.
- Ärge hoidke seadet kohtades, kus see võib kokku puutuda otsese päikesevalguse, niiskuse, kõrge

temperatuur, niiskus, tolmu, sool, kemikaalid või söövitavad gaasid.

- Vältige tugevaid lööke, otseseid kokkupõrkeid ning päikesevalguse või vihma käes viibimist. Ladustamis- ja transporditingimused:

Temperatuur: -20 °C kuni +55 °C

Niiskus: 10% kuni 95% suhteline õhuniiskus

(mittekondenseeruv) Atmosfäärirõhk: 80 kPa kuni 105 kPa

Ärge hoidke seadet järgmistes keskkondades:

- Keskkonnad, kus on vesi, kõrge temperatuur, niiskus, otsene päikesevalgus, tolm või sool.
- Keskkonnad, mis võivad tekitada kaldeid, vibratsiooni või lööke.
- Keskkonnad, kus hoitakse kemikaale või tekivad söövitavad gaasid. Hoidke

varurihma (koos turvapadjaga) hoolikalt, kui te seda ei kasuta.

Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte, näiteks auto armatuurlauale või aknalauale.

Hoidke seadet eemal kuumus- ja tuleallikatest, näiteks elektriradiaatoritest, mikrolaineahjustest, pliitidest, veesoojenditest, ahjustest, küünaldest või muudest kohtadest, kus see võib kokku puutuda kõrge temperatuuriga.

Vigastuste, talitlushäirete või plahvatuste vältimiseks hoidke seadet lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas ning veenduge, et nad seadet ega selle tarvikuid kogemata alla ei neelaks ega hammustaks.

3.2 Seadme puhastamine

- Hoidke seadet puhtana ja kuivana.
- Kui kella korpus või rihm (sh turvapadi) on määrdunud, puhastage see kuiva pehme lapiga. Kui mustust on raske eemaldada, keerake puhtasse vette või 75% alkoholiga kastetud lapp täielikult kokku ja kuivatage see ning seejärel pühkige sellega enne seadme kandmist kahjustatud piirkond puhtaks.



Ettevaatusabinõud

- Seadme korpuse ja rihma (sh turvapadja) puhastamisel jälgige, et seadmesse ei satuks vedelikku.
- Ärge kastke kella korpust ega rihma (sh turvapadja) vette ega kuivatage neid kuivatusseadmega.
- Ärge kasutage seadme korpuse ja rihma (sh turvapadja) puhastamiseks orgaanilisi lahusteid (näiteks käte desinfitseerimisvahendit, seebivett või muid happelisi lahusteid) ega tugevaid pesuvahendeid või desinfitseerimisvahendeid.
- Ärge kasutage seadme ega selle tarvikute puhastamiseks teravaid ega kõvasid esemeid (näiteks terasest traadist puhastuspalle).

3.3 Keskkonnakaitse avaldus

- Ärge visake seadet ega selle lisatarvikuid prügikasti.
- Palun järgige kõiki selle seadme ja selle lisaseadmete utiliseerimisega seotud asjakohaseid seadusi ja eeskirju ning toetage ringlussevõtu jõupingutusi.
- See seade ja selle lisatarvikud tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele keskkonnakaitse eeskirjadele.

4. Sümbolid ja kujundid

Joonised ja sümbolid	Kirjeldus
	BF-tüüpi rakendusosa
	Ettevaatust
IP68	Näitab, et toode on tolmu- ja veekindel.
	Näitab, et toodet saab taaskasutada.
 Bluetooth®	Lühikese vahemaaga raadiotehnoloogia, Bluetoothi sertifitseerimismärk.
	Näitab, et seda seadet toetab mittetulundusühing Forest Stewardship Council, mis on pühendunud säästva metsamajandamise edendamisele.
	Näitab, et eseme utiliseerimisel tuleks see taaskasutada.
	Mitteioniseeriv elektromagnetiline kiirgus
	Meditsiiniseade
CE 0197	CE-märgis. Näitab, et seade vastab direktiivile EU 2017/745.
	Selle seadme kasutamisel järgige seda juhendit hoolikalt.

EC REP

Volitatud esindaja Euroopa Liidus



Tootja



Temperatuurivahemik, mida seade ohutult talub



Niiskuse vahemik, mida seade ohutult talub



Atmosfäärirõhu vahemik, mida seade ohutult talub

SN

Seerianumber

#

Mudelinumber

UDI

Seadme unikaalne identifikaator



Valmistamise kuupäev



Kuidas seadet õigesti kanda



Eemaldage pakend ja visake see vastavasse taaskasutusprügikasti vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele.



Taaskasutatav lainepapist puitkiudplaat



Importija

Märkus: Toote tagaküljel olevad kaks numbrit pärast 16-kohalist sümbolit tähistavad tootmisaastat ja -kuud. Esimene number on aasta viimane number, teine number näitab kuud ja kuid 1 kuni 12 tähistavad vastavalt numbrid 1 kuni 9, A, B ja C. Näiteks 42 vastab veebruarile 2024.

Laadimiskarbi seerianumbri kaheksa viimast numbrit näitavad aastat (üks number), kuud (üks number) ja seerianumbrit (kuus numbrit). Näiteks kui viimased kaheksa numbrit on 48xxxxxx, toodeti laadimiskarp augustis 2024.

5. Elektromagnetilise ühilduvuse deklaratsioon

See seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standardile IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <https://consumer.huawei.com/en/>.

Põhiline jõudlus

- Standardmõõtevahemiku (temperatuur: 5–40 °C; suhteline õhuniiskus: 10–95%, kondenseerumiseta) mis tahes punktis peab vererõhu mõõtmise maksimaalne viga olema väiksem või võrdne ± 3 mmHg ($\pm 0,4$ kPa) või $\pm 2\%$ näidust, olenevalt sellest, kumb on suurem.
- Laboritingimustes (seadme testimiseks) tehtud vererõhu mõõtmised peavad olema korratavad täpsusega 3,0 mmHg (0,4 kPa).

Ohutusteave

Autoriõigus © Huawei Device Co., Ltd. 2024. Kõik õigused kaitstud.

SEE DOKUMENT ON ESITATUD AINULT INFORMATSIIVSEKS EESMÄRGIKS EGA KUJUNDUSTA MINGISUGUST GARANTIIDEST.

Kaubamärgid ja load

See *Bluetooth*® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele *Bluetooth SIG, Inc.* ja mis tahes kasutus Selliste kaubamärkide kasutamine Huawei Technologies Co., Ltd. poolt litsentsi alusel. Huawei Device Co., Ltd. on Huawei Technologies Co., Ltd. sidusettevõtte.

Muud mainitud kaubamärgid, toote-, teenuse- ja ettevõtete nimed võivad olla nende vastavate omanike omand.

Privaatsuspoliitika

Et paremini mõista, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme, lugege palun privaatsuspoliitikat aadressil <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Lõhkamiskapslid ja -alad

Lõhkamispiirkonnas või aladel, kus on vastav märguanne, lülitage mobiiltelefon või muu traadita seade välja, et vältida lõhkamistöõde häirimist.

Bensiinijaamad ja plahvatusohtlikud keskkonnad

Plahvatusohtlikes kohtades järgige kõiki välja pandud silte, mis lubavad traadita seadmed, näiteks telefoni või muu raadioseadme, välja lülitada. Plahvatusohtlike alade hulka kuuluvad tankimisalad, paatide tekialused alad, kütuse või kemikaalide transpordi- või ladustamisrajatised ning alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja, tolmu või metallipulbrit.

Töötamine ja ohutus



[Hoiatus] Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu ohutusteave, et tagada selle ohutus.

ja õige kasutamise kohta ning õppige, kuidas seadet õigesti utiliseerida.

- Heakskiitmata või ühildumatu toiteadapteri, laadija või aku kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte.



- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikka aega valju helitugevusega.
- Ideaalne töötemperatuur on 5–40 °C.
- Vältige metallesemete asetamist juhtmevaba laadimisaluse pinnale, kuna need võivad põhjustada seadme kuumenemist ja talitlushäireid. Kasutage juhtmevaba laadimisalust ainult keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus 5–40 °C.
- Kui ümbritseva õhu temperatuur on liiga kõrge, võib juhtmevaba laadija töötamise lõpetada. Sellisel juhul on soovitatav juhtmevaba laadimine peatada.
- Juhtmevaba laadija heas seisukorras hoidmiseks ärge kasutage seda sõidukis.
- Kui lapsed seda toodet kasutavad või sellega kokku puutuvad, on soovitatav täiskasvanu järelevalve.
- Palun konsulteerige oma arsti ja seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas teie seadme töö võib häirida teie meditsiiniseadme tööd.
- Lülitage oma traadita seade välja, kui seda haiglates, kliinikutes või tervishoiuasutustes palutakse. Need palved on loodud tundlike meditsiiniseadmete võimaliku häirimise vältimiseks.
- Lülitage oma traadita seade välja alati, kui lennujaama või lennufirma töötajad seda paluvad. Küsige lennufirma töötajatelt traadita seadmete kasutamise kohta lennukis. Kui teie seadmel on lennurežiim, tuleb see enne lennukisse minekut lubada.
- Mõned traadita seadmed võivad mõjutada kuuldeaparaatide või südamestimulaatorite tööd. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Südamestimulaatorite tootjad soovivad südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks hoida seadme ja südamestimulaatori vahel vähemalt 15 cm kaugust. Kui kasutate südamestimulaatorit, hoidke seadet südamestimulaatori vastasküljel ja ärge kandke seadet esitaskus.
- Hoidke akut eemal tulest, liigsest kuumusest, äärmiselt madalast õhurõhust ja otsesest päikesevalgusest. Ärge asetage seda kütteseadmete peale ega sisse. Ärge võtke seda lahti, muutke, visake ega pigistage. Ärge sisestage sellesse võõrkehi, ärge kastke seda vedelikesse ega jätke seda välise jõu või rõhu kätte, kuna see võib põhjustada lekke, ülekuumenemise, süttimise või isegi plahvatuse.
- Seadme kasutamisel järgige kohalikke seadusi ja eeskirju. Õnnetusohu vähendamiseks ärge kasutage oma

juhtmeta seadet autojuhtimise ajal.

- Seadme osade või sisemiste vooluringide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seda tolmu-, suitsu-, niiskes või määrdunud keskkonnas ega magnetväljade läheduses.
- Ärge kasutage, hoidke ega transportige seadet kohtades, kus hoitakse tuleohtlikke või plahvatusohtlikke aineid (näiteks bensiinijaamas, naftahoidlas või keemiatehases). Seadme kasutamine nendes keskkondades suurendab plahvatuse või tulekahju ohtu.
- Seade, aku ja lisatarvikud tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele. Neid ei tohiks utiliseerida tavalise olmeprügi hulka. Aku vale kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte.
- Ärge proovige akut ise vahetada – see võib akut kahjustada, mis omakorda võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju ja vigastusi. Seadme sisseehitatud akut peaks hooldama Huawei või volitatud teenusepakkuja.
- Kui seadme kandmisel tekib naha ebamugavustunne, võtke see ära ja pöörduge arsti poole.
- Kui aku lekitab, veenduge, et elektrolüüt ei satuks otse nahale ega silmadesse. Kui elektrolüüt puutub kokku nahaga või pritsib silma, loputage koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole.
- Ärge asetage mikrofoni lähedale teravaid metallesemeid, näiteks nõelu. Mikrofon võib neid ligi tõmmata ja vigastusi põhjustada.
- Traadita seadmed võivad häirida lennuki pardasüsteemi tööd. Ärge kasutage seadet kohtades, kus lennukifirma eeskirjade kohaselt on traadita seadmed keelatud.
- Seadme mikrofoni parima helikvaliteedi tagamiseks pühkige mikrofoni veega kokkupuutunud ala lapiga. Ärge kasutage mikrofoni enne, kui märjad alad on täielikult kuivad.
- Kaitske kantavat seadet ja selle tarvikuid tugevate löökide, tugeva vibratsiooni, kriimustuste ja teravate esemete eest, kuna need võivad seadet kahjustada.
- Veenduge, et kantav ese ja selle lisatarvikud püsiksid puhtad ja kuivad.
- Veenduge, et toiteadapter vastab standardi IEC/EN 62368-1 ohutusnõuetele ning on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele või kohalikele standarditele.
- Palun teatage tootjale ja oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele kõigest selle seadmega seotud tõsistest intsidentidest.
- See seade sisaldab mündi-, nupu- või väikesemõõtmelist patareid. Ärge neelake patareid alla, kuna see on

keemilise põletuse oht.

- Mündi-, nupu- või väikesemõõtmelise patarei allaneelamisel võib see kõigest 2 tunniga põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ja surma.
- Hoidke uusi ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui patareipesa ei sulgu kindlalt, lõpetage toote kasutamine ja hoidke see lastele kättesaamatus kohas. Kui arvate, et patareid on alla neelatud või pandud kehasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Jäätmekäitluse ja ringlussevõtu teave



Tootel, akul, kirjanduses või pakendil olev sümbol tähendab, et tooted ja akud tuleb eluea lõppedes viia kohalike omavalitsuste määratud eraldi jäätmekogumispunktidesse. See tagab, et elektroonikaromusid taaskasutatakse ja töödeldakse viisil, mis säästab väärtuslikke materjale ning kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohalike omavalitsuste, jaemüüja või olmejäätmete käitlemise teenusega või külastage veebisaiti <https://consumer.huawei.com/en/>.

Ohtlike ainete vähendamine

See seade ja selle elektrilised lisaseadmed vastavad kohalikele eeskirjadele teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, näiteks ELi REACH-määrus, RoHS-direktiiv ja patareide direktiiv (kui see on olemas). REACH-i ja RoHS-i vastavusdeklaratsioonide vaatamiseks külastage veebisaiti <https://consumer.huawei.com/certification>.

Ühendkuningriigi regulatiivsele vastavusele

Käesolevaga kinnitab Huawei Device Co., Ltd., et see seade LCA-B10/LCA-B11 vastab Ühendkuningriigi asjakohastele õigusaktidele. Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Ühendkuningriigi PSTI-nõuetele vastavus

See toode vastab toote turvalisuse ja telekommunikatsioonitaristu (asjakohaste ühendatavate toodete turvanõuded) eeskirjade 2023. aasta lisas 1 sätestatud asjakohastele turvanõuetele. PSTI vastavusavalduse täistekst on saadaval järgmisel veebisaidil: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Raadiosagedusliku kiirguse nõuded

Nagu rahvusvahelised suunised soovivad, on seade konstrueeritud vastama turu kehtestatud piirangutele, kus seade turule tuuakse.

Riikides, kus SAR-i piirang on 2,0 W/kg (pea) ja 4,0 W/kg (jäsened) 10 grammi koe kohta. Seade vastab raadiosagedusliku kiirguse spetsifikatsioonidele, kui seadet kantakse randmel ja näost 1,0 cm kaugusel.

Kõrgeim teatatud SAR-väärtus: Pea SAR: 0,05 W/kg Jäsemete SAR: 0,08 W/kg

Vastavus EL-i regulatsioonidele

Käesolevaga kinnitab Huawei Device Co., Ltd., et see seade LCA-B10/LCA-B11 vastab standardile

RED-direktiiv 2014/53/EL, RoHS-direktiiv 2011/65/EL ja MDR-määrus 2017/745/EL.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst ja uusim teave lisatarvikute ja tarkvara kohta on saadaval aadressil

<https://consumer.huawei.com/certification>.

Sagedusribad ja võimsus

Sagedusribad, millel raadioseade töötab: Mõned sagedusribad ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku operaatoriga.

Bluetooth 2,4 GHz: 15,5 dBm, NFC 13,56 MHz: 42 dBµA/m 10 m kaugusel, kella juhtmevaba laadija 110,5 kHz–119 kHz, 135 kHz–140 kHz: 42 dBµA/m 10 m kaugusel, 119 kHz–135 kHz: 66 laskudes 10 dB/kahanedes üle 119 kHz 10 m kaugusel, 140 kHz–148 kHz: 37,7 dBµA/m 10 m kaugusel.

Oma riigi või piirkonna uusimate abitelefoninumbrite ja e-posti aadresside vaatamiseks külastage veebilehte <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Palun minge aadressile **Seaded>Teave>Regulatiivne teaveseadmel**, et vaadata e-märgise ekraani.

CE 0197



Lotus NL BV

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Haag, Holland.



Huawei Device Co., Ltd.

Xincheng Road nr 2, Songshan Lake Zone, Dongguan, 523808 Guangdong,

Hiina